


## ● 基本の持ち方 ●

長くでているところに中指


・マイク穴の上側

・赤のしるし ● 右 に人さし指  
(オプション)

取り出し用のひもがある方が親指

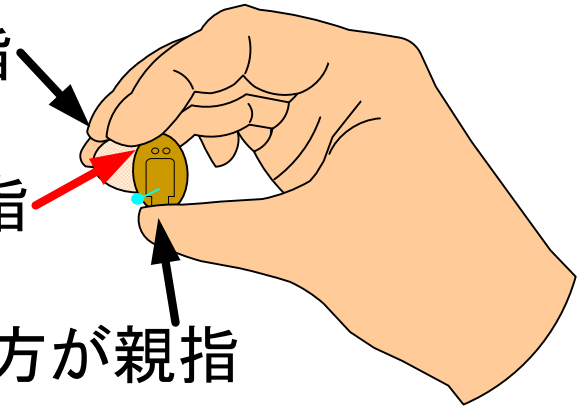


## 1: 補聴器を耳に持っていく

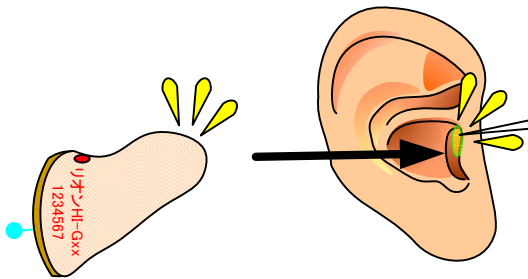


補聴器の先が耳の穴の前部分に当たる感じで持っていく

## 2: 補聴器を耳の穴の中に入れる

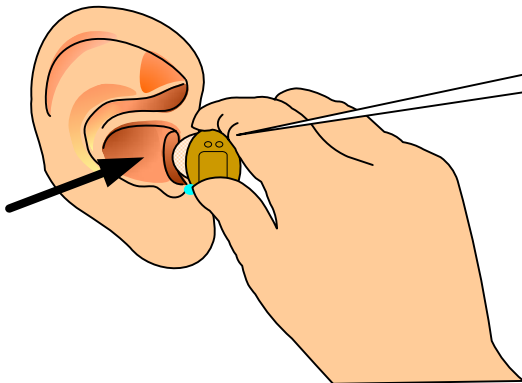


補聴器の先端部分を耳の穴に入れる

## 3: 補聴器がぴったり入るところまで押し入れる

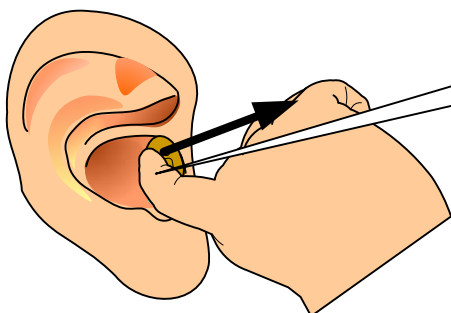


補聴器の面の後ろ側から引っ掛けるような感じで自分の鼻の方向に押す


## ● 基本の持ち方 ●

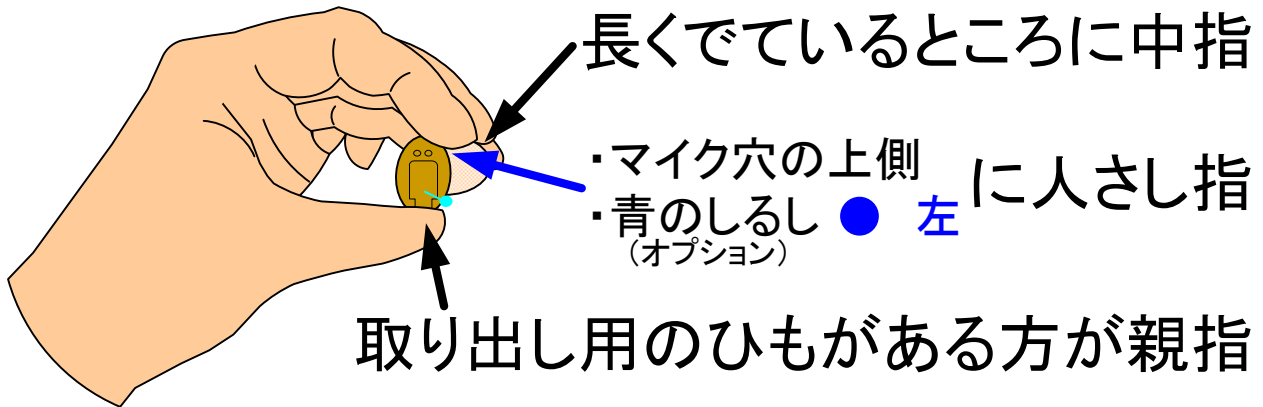

### 1: 補聴器を耳に持っていく

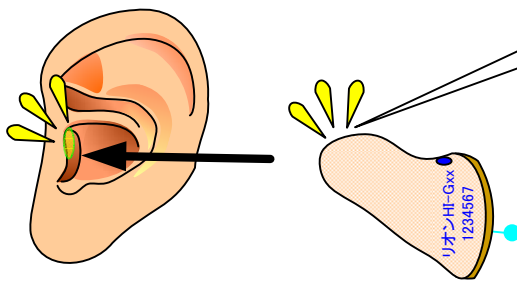

### 2: 補聴器を耳の穴の中に入れる

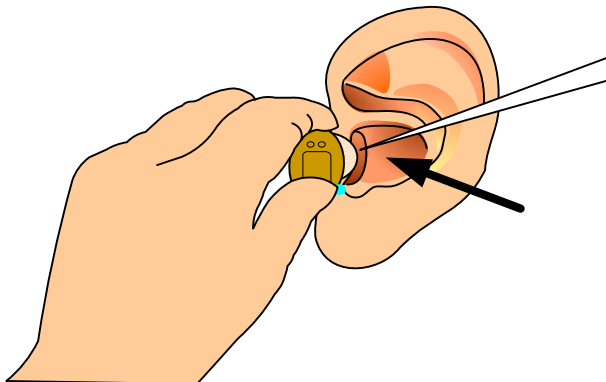

### 3: 補聴器がぴったり入るところまで押し入れる

